

It supports gently……

21世紀の看護と快適生活を応援するリラクゼーションアイテム

For your comfort……  
**VISCO-FLOAT**  
ヴィスコフロート

**VISCO-FLOAT-MEDICAL** ヴィスコフロートメディカル  
**VISCO-FLOAT-i** ヴィスコフロートアイ

### 消費税改定に伴う価格変更について

本カタログに表示の価格は5%の消費税を含んでいます。

平成26年4月1日より、消費税改定(8%)に従い、税込販売価格が変更になりますのでご注意ください。



## 看護と健康生活をサポート

ヴィスコフロートは、身体にかかる圧力を感じとって分散する新素材として開発された超ソフト触感のモールド型低反発ウレタンフォーム“ニューロンフォーム”を使用した21世紀の看護と快適生活を応援するリラクゼーションアイテムです。

※ニューロンフォームは、国産のモールド型低反発ウレタンフォームの商標です。



モールド型とは

通常の低反発ウレタンフォームは、新幹線の車両（60m）くらいの大きなウレタンを製品に合わせた大きさや形にカットして製造するスラブ方式で作られています。スポンジのように密度が少なく、空気が抜け、弾力も弱く、低反発力が弱くなりがちです。それに比べ、ヴィスコフロートの「モールド方式」は、製品ごとに金型（アルミ製の型）を作り、その型の中で一つ一つを丁寧に手作りで製造する方法です。製造時にできる“スキン層”と呼ばれる特殊な膜が内側の気泡を守り、優れた低反発力と耐久性を生み出しています。

### ■ニューロンフォーム 4つのポイント

#### Point 1

**優れた粘弾性で、圧迫感を感じさせません。**

ニューロンフォームは、通気性を保ちながら特殊な粘弾性で、ゆっくりと沈み込む特性を持っています。血行を妨げたり、筋肉を緊張させることがなく、身体へ負担をかけません。



#### Point 2

**優れた耐久性で、快適な使い心地が持続します。**


ニューロンフォームの密度は、93.1~110kg/m<sup>3</sup>と非常に高く、圧縮残留ひずみ試験、温熱老化試験、背上げ耐久試験（マットレス）など、様々な試験で耐久性を確認。高密度でもふんわりした柔らかさをもつ商品です。

#### Point 3

**優れた通気性で、ムレ感をほとんど感じさせません。**

ニューロンフォームは、通気性に優れたオープンセル構造。熱のこもり、ムレ感が大幅に軽減されます。

#### ■低反発ウレタンフォーム顕微鏡写真

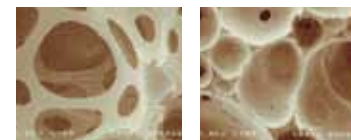

ニューロンフォーム 一般的な低反発ウレタン

低反発ウレタンフォームを顕微鏡写真で拡大すると“セル”と呼ばれる小さな粒が見えます。ニューロンフォームは“セル”の粒に穴が空いているのが分かります。これが“オープンセル=連通気泡”と呼ばれる構造で、優れた通気性を生み出しています。

#### Point 4

**寒い冬でも硬くならず、ふんわり感を保ちます。**


ニューロンフォームは、高密度ウレタンなので、優れた耐久性があり、気温差、湿度差に関わらず、四季を通して適度に固くしなやかな使用感を保ちます。

※一部の商品は、若干硬くなります。

首や肩にフィットする形で頭や首への負担を軽くする安眠枕

ヴィスコフロート ジャポニカ

## 安眠枕

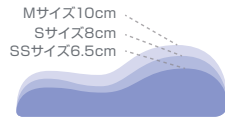

サイズ選びの目安  
Mサイズ：身長155cm以上  
Sサイズ：身長145~165cm  
SSサイズ：身長145cm以下

日本製

“安眠枕”は、体型に合わせてフィットするようデザインされているので、最適な角度で頭部を支え、肩や頸椎にかかる負担を軽減します。

(M) VT202ブルー [JAN 4943013035729]・VT202ピンク [JAN 4943013038997] 12,600円(税込)  
(S) VT199ブルー [JAN 4943013035736]・VT199ピンク [JAN 4943013038966] 11,550円(税込)  
(SS) VT198ブルー [JAN 4943013035743]・VT198ピンク [JAN 4943013038942] 10,500円(税込)


■サイズ / 幅53×奥行31×高さ (M) 7~10cm・(S) 5~8cm・(SS) 4~6.5cm  
■重量 / (M) 約1,450g・(S) 約1,200g・(SS) 約970g  
■材質 / 中材：モールド型低反発ウレタンフォーム (ニューロンフォーム)  
枕カバー：綿65%・ポリエステル35% (綿ペロア)、内カバー：ポリエステル100%



日本人の体型と首もとのラインにピッタリとフィット

ヴィスコフロート ジャポニカ

## フィットスルーピロー

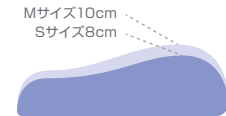

サイズ選びの目安  
Mサイズ：身長155cm以上  
Sサイズ：身長145~165cm

日本製

頭部のかたちに合わせて中央部分にくぼみを作り、首もと・肩のラインにできるすきま部分を埋め、理想的な寝姿勢をサポート。

(M) VT202Fブルー [JAN 4943013038799]・VT202FPピンク [JAN 4943013038973] 13,650円(税込)  
(S) VT199Fブルー [JAN 4943013039338]・VT199FPピンク [JAN 4943013039345] 13,650円(税込)


■サイズ / 幅50×奥行35×高さ (M) 10cm・(S) 8cm  
■重量 / (M) 約1,260g・(S) 約980g  
■材質 / 中材：モールド型低反発ウレタンフォーム (ニューロンフォーム)  
枕カバー：綿65%・ポリエステル35% (綿ペロア)、内カバー：ポリエステル100%



背中から腰への自然なラインをキープ

ヴィスコフロート ジャポニカ

## 腰枕

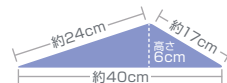

腰の痛みは、内臓の疾患や骨粗しょう症・筋肉疲労・背骨の歪みなど様々な原因があります。腰椎の関節が歪み、神経が圧迫されると、腰の痛みだけでなく首や肩、足先など全身に痛みが及ぶこともあります。人間の身体には凸凹がたくさんあり、骨や筋肉が出ている場所に負担となる圧力が集中しがちです。体圧分散に優れた素材を使い、その圧力を分散させることで身体への負担を軽くすることは、予防としても効果的です。

日本製

背中から腰への自然なラインをキープし腰に負担をかけない寝姿を維持する腰専用まくら。腰痛の方や床ずれのできやすい方におすすめします。

VT203 [JAN 4943013035750] 12,600円(税込)

■サイズ / 幅60×奥行40×高さ2~6cm ■重量 / 約1,200g  
■材質 / 中材：モールド型低反発ウレタンフォーム (ニューロンフォーム)  
外カバー：綿65%・ポリエステル35% (綿ペロア)、内カバー：ポリエステル100%




身体に合わせてご使用ください

身体の各部位に対応し除圧する万能ピロー

ヴィスコフロート ジャポニカ

## リラクゼーションピロー

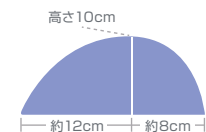

日本製

身体や足の重さに合わせてゆっくと沈み、自然な状態でフィット。床ずれ予防や足枕など、全身に使用できる万能タイプの半円形枕です。

VT210ブルー [JAN 4943013037068]・VT210ピンク [JAN 4943013039192] 10,290円(税込)

■サイズ / 幅50×奥行20×高さ10cm ■重量 / 約900g  
■材質 / 中材：モールド型低反発ウレタンフォーム (ニューロンフォーム)  
外カバー：綿65%・ポリエステル35% (綿ペロア)、内カバー：ポリエステル100%



床ずれ予防製品として体圧を分散



足枕として、疲れた足を癒します

腰やおしりにかかる負担を分散

ヴィスコフロート ジャポニカ

## シートクッション

ヴィスコフロート ジャポニカ

## 背中用パッド



シートクッション  
(ワイン)

背中用パッド  
(ワイン)

日本製

シートクッションは、おしりの形に合わせてゆっくりと沈み、体圧を均一に分散。  
背中用パッドは、車椅子や自動車の座席・食卓用椅子などの背もたれに最適です。  
長時間座りっぱなしの方の苦痛を和らげます。  
転落等、危険防止のため裏側には滑り止め加工を施した特殊ゴムを使用。(特許取得)

(シート) VT228ブラック	[JAN 4943013039178]	12,600円(税込)	[TAIS 01219-000008]
スタンダード	VT226ワイン	[JAN 4943013039260]	12,600円(税込) [TAIS 01219-000008]
(シート)	VT229ブラック	[JAN 4943013039185]	12,600円(税込) [TAIS 01219-000008]
ソフトタッチ	VT227ワイン	[JAN 4943013039277]	12,600円(税込) [TAIS 01219-000008]
(背用パッド)	VT216ブラック	[JAN 4943013039208]	8,400円(税込)
	VT218ワイン	[JAN 4943013039284]	8,400円(税込)

- サイズ／(シート) 幅40×縦40×厚さ5cm (背用パッド) 幅30×縦40×厚さ2~6cm
- 重量／(シート) 約950g (背用パッド) 約680g
- 材質／中材：モールド型低反発ウレタンフォーム (ニューロンフォーム)  
外カバー：ポリエステル100% (ニット)、内カバー：ポリエステル100%



イス使用時 (ブラック)

おしりや腰にかかる負担を軽減

ヴィスコフロート ジャポニカ

## 円座



日本製

通気性が良く、暑い季節でも蒸れにくく、一年中快適に使用できます。  
ドーナツ型で穴が開いているので、傷口にもあたりません。  
ほどよい硬さと低反発力が周辺部や上半身を支えてくれます。  
出産後の痛みや痔の痛み・腰痛などでお悩みの方におすすめです。

VT221 [JAN 4943013039215] 12,600円(税込)

- サイズ／幅38×縦38×高さ5.8cm、内径10cm
- 重量／約650g
- 材質／中材：モールド型低反発ウレタンフォーム (ニューロンフォーム)  
カバー：ポリエステル100% (ニット)



リラクスタイムに床に置いて使用

車イス使用時の身体にかかる負担を軽減

ヴィスコフロート ジャポニカ

## 車いす用 Pシート クッション

ヴィスコフロート ジャポニカ

## 車いす用 背クッション



Pシートクッション  
(ベージュ)

背クッション  
(ベージュ)

日本製



背中が安定するように  
設計されたアーチ型

Pシートクッションは、太ももの部分が盛り上がり、より安定した座位ポジションの実現と長時間座位による疲れを軽減する設計。  
中材はニューロンフォームで耐久性抜群、裏側は滑り止め加工特殊ゴムを使用。  
車いす用背クッションは、背中が安定するように設計。  
長時間車いすに座っていても、座位保持が保てます。  
中材のウレタンは通気性のある特殊ウレタンを再加工したものを使用。

(Pシート) VT721ネイビー	[JAN 4532965961226]	12,600円(税込)	[TAIS 01219-000007]
	VT721ベージュ	[JAN 4532965961233]	12,600円(税込) [TAIS 01219-000007]
(背クッション)	VT722ネイビー	[JAN 4532965961240]	7,350円(税込) [TAIS 01219-000002]
	VT722ベージュ	[JAN 4532965961257]	7,350円(税込) [TAIS 01219-000002]

- サイズ／(Pシート) 幅40×奥行40×前方7・中央4・後方5cm (背クッション) 幅40×高さ40×奥行14cm
- 重量／(Pシート) 約000g (背クッション) 1,100g
- 材質／(Pシート) 中材：モールド型低反発ウレタンフォーム (ニューロンフォーム)  
(背クッション) 中材：高反発ウレタンフォーム 脱膜特殊加工  
カバー：ポリエステル100% 立体メッシュ生地 カラー：ネイビー・ベージュ



車いす使用時 (ネイビー)

ヴィスコフロートシリーズは医療機関や介護施設で褥瘡対策や苦痛軽減、  
体位保持などに役立つ看護備品として採用されています。

### ■ヴィスコフロートシリーズの医療機関、介護施設での主な使用事例

安眠枕	・MRI、処置室、アンギオ検査室、ICUリハビリ室等における患者の頭部の苦痛軽減 ・脳神経外科病棟における手術後の患者の苦痛軽減
腰枕	・産婦人科病棟、脳外科病棟、整形外科病棟等における入院患者の苦痛軽減 ・リハビリ室や人工透析室における患者の苦痛軽減 ・整形外科病棟における苦痛軽減
リラクゼーションビロー	・ICUにおいて踵部を上げることで、患者の血液を心臓に戻りやすくするために使用 ・内視鏡室における枕としての使用 ・病棟やリハビリ室における患者のバスタビローとしての使用
マットレス・ミニマットレス	・手術後の患者の苦痛軽減 ・整形外科病棟における患者の苦痛軽減 ・手術室用のマットレス ・ICU、MRI検査室用のマットレスとして使用
背中用パッド	・MRIにおける苦痛軽減 ・病棟の入院患者の腰痛対策として使用 ・腰痛のある患者のリハビリ台に使用
シートクッション	・車イス上ならびにベッド上における座位の保持 ・腰痛対策
車いす用Pシートクッション・背クッション	・車イス上における座位の保持 ・腰痛対策

## 優れた粘弾性で、身体への圧迫感を感じさせない 高反発ウレタンマットレス

ヴィスコフロート・ジャポニカシリーズのマットレスは、  
 通気性を保ちながら特殊な粘弾性で、身体の凸凹に合わせてゆっくりと沈み込み、  
 体圧を均一に吸収、分散するので一点に負担が集中しないため、血行を妨げたり、  
 筋肉を緊張させることがなく、身体へ負担をかけません。  
 体圧分散性に優れた体圧分散タイプと通気性に優れた高通気タイプの2種類があります。

高反発ウレタンのプロファイルが身体をしっかり支えます

ヴィスコフロート ジャポニカ

### 体圧分散マットレス



ネイビー

高反発ウレタンのプロファイルが  
 身体を点で支えるため、優れた体圧分散を実現。  
 通気性、耐久性に優れた高品質のマットレス。

日本製

- (91cm幅) VT701ネイビー [JAN 4532965961165] 42,000円(税込) 【TAIS 01219-000003】
- VT701ベージュ [JAN 4532965961431] 42,000円(税込) 【TAIS 01219-000003】
- (83cm幅) VT702ネイビー [JAN 4532965961172] 42,000円(税込) 【TAIS 01219-000004】
- VT702ベージュ [JAN 4532965961448] 42,000円(税込) 【TAIS 01219-000004】

- サイズ/ (91cm幅) 幅91×長さ191×高さ8cm (83cm幅) 幅83×長さ191×高さ8cm
- 重量/ (91cm幅) 7.1kg (83cm幅) 6.1kg
- 材質/ 中材: 高反発ウレタンフォーム 比重0.045  
 カバー: ポリエステル100% 立体メッシュ生地 カラー: ネイビー・ベージュ



凸凹部分が  
 通気性をもち、  
 寝具内の湿度を軽減。  
 特殊ウレタンなので  
 ワタ切れやホコリが出ず、  
 ダニや害虫が住み着く  
 心配もありません。


### 立体メッシュ(カバー)



### ■体圧分布測定装置による身体にかかる圧力の測定結果


#### 体圧分散マットレス

色の濃い部分がなく、  
 全体的にバランスよく  
 体圧を分散しています。

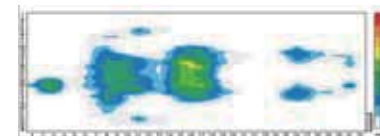

#### 一般的な敷きふとん


特に腰にかかる圧力が  
 強くかかっています。  
 (色の濃い部分)

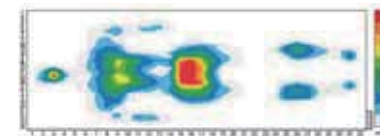

通気性抜群の高反発ウレタンで身体をしっかりサポート

ヴィスコフロート ジャポニカ

### 高通気マットレス

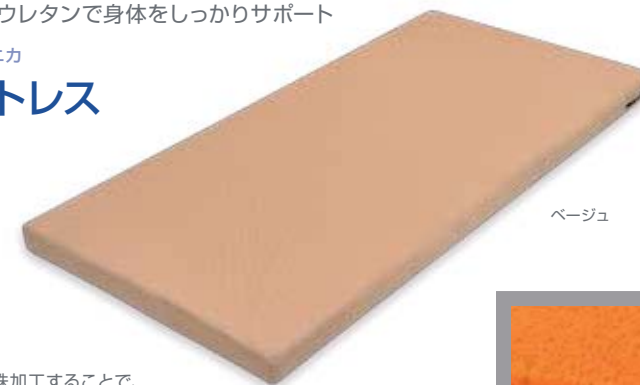

ベージュ

高反発ウレタンを脱膜特殊加工することで、  
 抜群の通気性を作り出した、高通気、高品質のマットレス。  
 高反発ウレタンなので、体圧分散にも優れています。

日本製

- (91cm幅) VT710ネイビー [JAN 4532965961189] 52,500円(税込) 【TAIS 01219-000005】
- VT710ベージュ [JAN 4532965961455] 52,500円(税込) 【TAIS 01219-000005】
- (83cm幅) VT711ネイビー [JAN 4532965961196] 52,500円(税込) 【TAIS 01219-000006】
- VT711ベージュ [JAN 4532965961462] 52,500円(税込) 【TAIS 01219-000006】

- サイズ/ (91cm幅) 幅91×長さ191×高さ8cm (83cm幅) 幅83×長さ191×高さ8cm
- 重量/ (91cm幅) 6.8kg (83cm幅) 6.2kg
- 材質/ 中材: 高反発ウレタンフォーム 脱膜特殊加工 比重0.040  
 カバー: ポリエステル100% 立体メッシュ生地 カラー: ネイビー・ベージュ



ウレタンの膜を  
 分解しているため、  
 高い通気性と  
 抜群の除湿効果があり、  
 常に寝具内の湿度を軽減。  
 耐久性、耐洗濯性にも  
 優れたマットレスです。

### 医療現場で活躍するメディカルシリーズ

メディカルシリーズは、消毒用薬液の使用にも強い特殊な防水素材“GALAX® MC”（完全防水カバー）を使用しています。

“GALAX® MC”は特殊高分子設計のウレタンを使用しているため、摩擦などの外力に対して極めて強い抵抗力を有し、塗工膜比では従来型ウレタンの3倍以上の擦過・摩擦抵抗性がある素材です。

完全防水性はもちろん、キズつきにくく、しかも-20℃~200℃までの温度変化に耐える耐久型長寿命ラミネート設計です。  
(通常のポリウレタンの軟化溶解温度は140℃~160℃)

また、エタノール希釈液・ヒビテン希釈液・オスバン希釈液・ハイアミン希釈液での消毒が可能です。



#### ■ GALAX防水カバーの特長

- ・撥水タイプ
- ・優れた耐熱性
- ・高強度タイプ
- ・難燃加工
- ・制菌加工


 (社)繊維評価技術協議会  
 認証番号009SA98  
 制菌加工  
 (繊維状の細菌の増殖を抑制します)  
 試験方法(菌液吸収法)  
 剤名:有機系(ピリジン)  
 BIO GUARD



エタノール希釈液等の薬液での清拭でお手入れできます


#### ■ GALAXと一般PULゼーとの物性比較

試験項目	試験方法	GALAX	一般PULゼー
耐摩耗性	JIS-L-1096 テーパー法 CS-17 0.5kg荷重	2,000回以上	500回以下
	JIS-L-1096 ユニバーサル法 0番 1ポンド荷重	10,000回以上	1,000回以下
耐擦過性	学振型 100番 200g荷重	70回	20回
耐引掻き性	学振型 スチールブレード 500g荷重	250回	60回
耐もみ性	スコット型 1kg×2,000回	異常なし	異常なし
耐寒性	JIS-K-6772 耐寒衝撃 -55℃	異常なし	-20℃まで
	耐寒屈曲フレキシソ法 -20℃	30,000回以上	3,000回以下
耐熱性耐熱	軟化点測定法	220℃	140~160℃
耐候性	ウェザオメーター50hrs	4級	3級

日本人の体圧データを元に製造した体圧分散マットレス

ヴィスコフロート メディカル

## メディカルマットレス

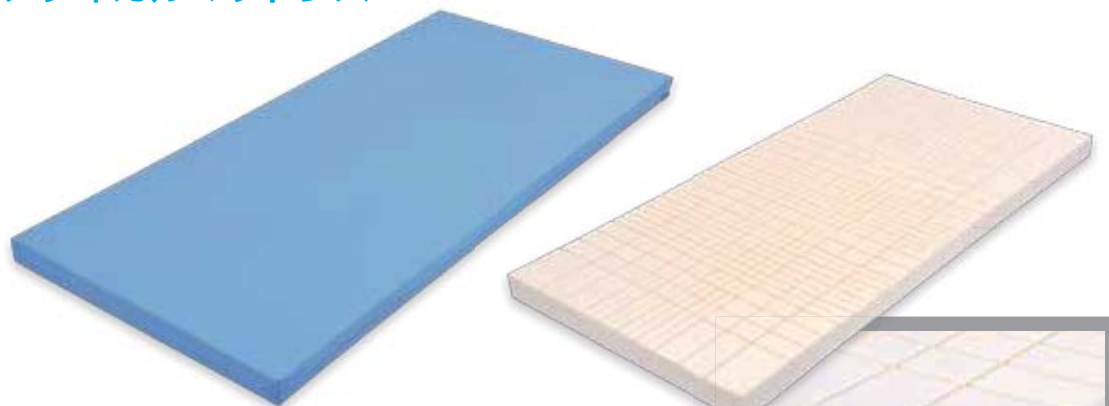

日本製

中材のウレタンフォームは比重0.067という日本国内では最高級の高反発ウレタンフォームで反発弾性60%を実現。高反発ウレタンフォームに日本人の体圧データを分析して、体圧を軽減するための切り込みを入れて、マットレスにかかる圧力を分散しています。

(91cm幅) VT730 [JAN 4532965961264] 105,000円(税込) 【TAIS 01219-000009】  
(83cm幅) VT731 [JAN 4532965961271] 105,000円(税込) 【TAIS 01219-000010】

■サイズ／(91cm幅) 幅91×長さ191×高さ8cm (83cm幅) 幅83×長さ191×高さ8cm

■重量／(91cm幅) 約8.3kg (83cm幅) 約7.6kg

■材質／中材：上部 特殊ウレタンフォーム(0.067比重) 硬さ160ニュートン  
外カバー：ポリエステル100% GALAX完全防水カバー

体圧のかかりやすい部分に細かく切れ込みを入れることにより、より細かい体圧分散ができ、そのため、身体全体の体圧分散が平均化して、より睡眠効果を上げることができます。  
(足利工業大学 睡眠科学センター調査)  
下層部はより身体の圧力を支えるため、2層式構造になっています。

体圧分散に優れた素材で身体を部分的に除圧

ヴィスコフロート メディカル

## ミニマットレス



日本製

床ずれが気になる方の体位の変換・保持や、リハビリ用マットとしてご使用ください。怪我などで手や足など部分的にクッション類をはさむ必要のある方にもおすすめします。

VT610 [JAN 4943013038843] 33,600円(税込)

■サイズ／幅50×長さ70×高さ4cm

■重量／約1.9kg

■材質／中材：モールド型低反発ウレタンフォーム  
(ニューロンフォーム)

外カバー：ポリエステル100%

GALAX完全防水カバー


内カバー：ポリエステル100%



### ■体圧分布測定装置による身体にかかる圧力の測定結果


#### メディカルマットレス

色の濃い部分がなく、全体的にバランスよく体圧を分散しています。

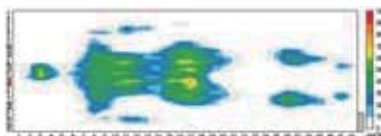

#### 一般的な敷きふとん

特に腰にかかる圧力が強くかかっています。(色の濃い部分)

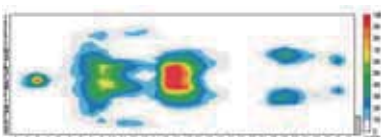

## サイズオーダー承ります。 お見積り、お問い合わせください。

手術台用マットレス・放射線用機器用マットレス(MRI・CTなど)、ICU用マットレスなどに対応したマットレスをお作りします。

## 1枚からでも注文をお受けします。

※サイズによってはお受けできない場合がございますのでご了承ください。



※写真はイメージです

首や肩にフィットする形で頭や首への負担を軽くする安眠枕

ヴィスコフロート メディカル

## メディカルピロー



日本製

メディカルピローは診察台やリハビリ台の上で使用する枕です。患者さんの首周辺部への除圧を実現します。幅が53cmと広いので患者さんに快適感を与え、精神的に落ち着いて診察を受けられます。

(M) VT202G [JAN 4943013038980] 15,750円(税込)  
(S) VT199G [JAN 4943013038959] 14,700円(税込)

■サイズ/幅53×奥行31×高さ(M) 7~10cm (S) 5~8cm  
■重量/(M) 約1450g (S) 約1200g  
■材質/中材: モールド型低反発ウレタンフォーム (ニューロンフォーム)  
外カバー: ポリエステル100% GALAX完全防水カバー 内カバー: ポリエステル100%

検査時、手術時などの除圧に適したハーフサイズ安眠枕

ヴィスコフロート メディカル

## メディカルピロー ハーフサイズ



日本製

メディカルピローのハーフサイズ。MRI検査や手術時の患者さんへの除圧対策に使用する枕です。長時間に渡る手術中の頸椎の保持、血行の維持を目的として使用されます。幅が26.5cmなので、検査時や手術時などに使用すると最適です。

(M) VT622 [JAN 4943013039048] 14,700円(税込)  
(S) VT621 [JAN 4943013039031] 13,650円(税込)

■サイズ/幅26.5×奥行31×高さ(M) 7~10cm (S) 5~8cm  
■重量/(M) 約740g (S) 約610g  
■材質/中材: モールド型低反発ウレタンフォーム (ニューロンフォーム)  
外カバー: ポリエステル100% GALAX完全防水カバー 内カバー: ポリエステル100%

腰周辺の苦痛を軽減

ヴィスコフロート メディカル

## 腰枕



日本製


- 手術室における各部位の除圧
- 手術後の安静必要時における除圧
- リハビリテーションでの腰周辺部の苦痛軽減を目的に使用

腰枕は腰痛対策、苦痛軽減等の目的で利用されます。特に仰臥位においての圧力の負担がかかる仙骨部周辺への除圧に適しています。


VT603 [JAN 4943013038591] 15,750円(税込)

■サイズ/幅60×奥行40×高さ2~6cm  
■重量/約1200g  
■材質/本体: モールド型低反発ウレタンフォーム (ニューロンフォーム)  
外カバー: ポリエステル100% GALAX完全防水カバー 内カバー: ポリエステル100%

### ■手術体位と手術部位

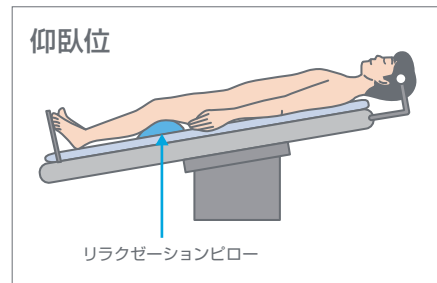


前頭葉・前頭蓋底・前頭葉～側頭葉前部・  
内頸動脈～前交通動脈・頸椎前方到達法

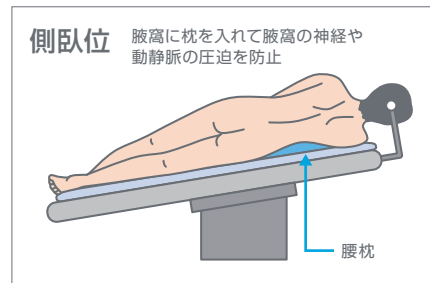

側頭葉・中頭蓋底・頭頂葉前部・後頭蓋窩



後頭蓋窩・後頭葉・頸椎椎弓切除術

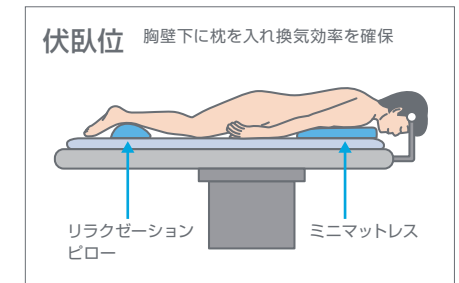

胸椎部以下の脊髄手術

脳神経外科領域では、患者の意識レベルの低下や麻痺による自発的体位変換が困難なことから、知覚障害が相まって褥瘡が容易に発生します。



各部位に対応し除圧する万能ピロー

ヴィスコフロート メディカル

## リラクゼーションピロー



日本製

身体の様々な部位に使用できる万能ピロー。手術中の患者さんの腕・背部・足などの褥創予防をはじめ、内視鏡室やリハビリ室での枕としても使用できます。

VT606 [JAN 4943013038614] 13,440円(税込)

■サイズ / 幅50×奥行20×高さ10cm

■重量 / 約900g

■材質 / 中材: モールド型低反発ウレタンフォーム (ニューロンフォーム)

外カバー: ポリエステル100% GALAX完全防水カバー 内カバー: ポリエステル100%

様々な用途、部位に対応し除圧する円筒型ピロー

ヴィスコフロート メディカル

## ボディサポートピロー



日本製

※ウレタンは  
中国製を使用  
しています

無理なく身体を支える円筒型のピローです。人間が感じる最適な状態にフィットするように設計されています。棒状で使用する以外に折り曲げて使用することも可能です。耐久性が高く、入院患者のベッド上での体位保持、除圧用品として使用されます。

VT611 [JAN 4943013039024] 8,400円(税込)

■サイズ / 長さ76×直径17cm

■重量 / 約980g

■材質 / 中材: モールド型低反発ウレタンフォーム

外カバー: ポリエステル100% GALAX完全防水カバー 内カバー: ポリエステル100%

おしりの形に合わせてフィット

ヴィスコフロート メディカル

## シートクッション



日本製

座った人のおしりの形に合わせてゆっくりと沈み、体圧を均一に分散。車いすを長時間使用される方の除圧に最適です。スタンダードとソフトタッチの2種類の硬さがあります。

(リフト) VT604 [JAN 4943013038607] 15,750円(税込) [TAIS 01219-000011]

(リフト) VT614 [JAN 4943013038621] 15,750円(税込) [TAIS 01219-000011]


■サイズ / 幅40×縦40×厚さ5cm

■重量 / 約950g


■材質 / 中材: モールド型低反発ウレタンフォーム (ニューロンフォーム)

外カバー: ポリエステル100% GALAX完全防水カバー 内カバー: ポリエステル100%

### ■手術後の利用例

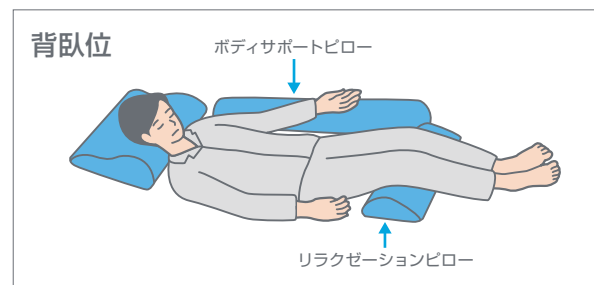

左上肢はボディサポートピローで高くし、リラックスさせる。両膝下にリラクゼーションピローを入れ、軽くヒザを曲げる。

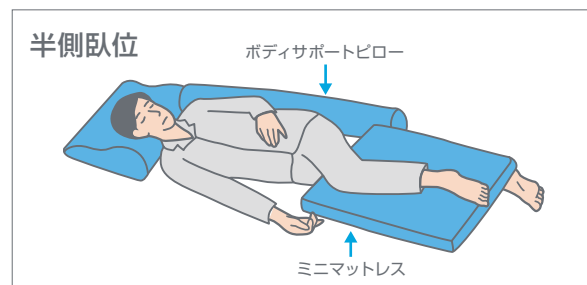

肩から腰にかけてボディサポートピローを入れ、身体を傾ける。足でミニマットレスを挟み片側の足にかかる負担を軽減する。



クッションを右側に置き、患側上肢を抱きかかえるようにのせる。下肢は半側臥位と同様にボディサポートピローを挟んで、患側下肢をのせる。

整形外科領域においても骨折等で特定の体位しか取ることができず、褥瘡のリスクが高まります。




## 生活介護をサポートするアイシリーズ

アイシリーズは、より身近な環境でご使用いただけるよう、ジャポニカシリーズの日本国内での製造技術を活かして、低コストの海外生産で製造したリーズナブルなシリーズ商品です。ヴィスコフロート アイは、介護の現場、特に介護ベッドの上や車いすの上で使うための商品です。中材は国内生産のウレタンと比べると、ウレタンの製造季節により、硬さに多少のズレが生じることがありますが、一つ一つ、丁寧に仕上げているので、安心してご使用いただける品質を保持しています。



### ヴィスコフロート アイ リハビリボール

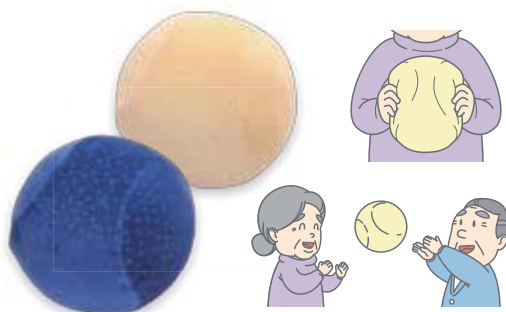

中国製

リハビリボールは低反発でできたバレーボール型のクッション。病後のリハビリや筋力維持のための商品です。反射神経を鍛えるためのキャッチボール、握力増強のために握る練習など、様々な場面でリハビリ商品としてお使いいただけます。

VT750ネイビー【JAN 4532965961318】 3,150円(税込)  
VT751アイポリ【JAN 4532965961325】 3,150円(税込)

- サイズ/直径22cm
- 重量/約350g
- 材質/中材：モールド型低反発ウレタンフォーム  
カバー：ペロアタイプ(綿80%、ポリエステル20%)  
カラー：ネイビー・アイポリ

### ヴィスコフロート アイ ネックピロー



中国製

介護ベッドを背上げた際に枕代わりとして、首に巻きつけてご使用いただけます。ベッドを背上げすると首との間に空間ができますが、その空間を埋める商品としてお使いください。さらにけがなどの患部を支える商品としてもご使用いただけます。

VT752【JAN 4532965961332】 3,150円(税込)

- サイズ/幅28×奥行28×高さ7cm
- 重量/約300g
- 材質/中材：モールド型低反発ウレタンフォーム  
カバー：ペロアタイプ(綿80%、ポリエステル20%)  
カラー：アイポリ

### ヴィスコフロート アイ フラットピロー




中国製

低反発のフラット枕です。介護ベッドの上で背上げをした時の背用クッションとしても使えます。フラットなので、いろいろな場面でご使用いただけます。

VT753ネイビー【JAN 4532965961349】 5,250円(税込)  
VT754アイポリ【JAN 4532965961356】 5,250円(税込)

- サイズ/幅57×奥行37×高さ11cm
- 重量/約1050g
- 材質/中材：モールド型低反発ウレタンフォーム  
カバー：ペロアタイプ(綿80%、ポリエステル20%)  
カラー：ネイビー・アイポリ

## ヴィスコフロート アイ フット&ウエストピロー

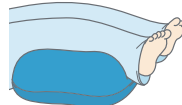

睡眠時の足枕として

中国製

ベッドの上では足枕として、  
車いすの上では腰の隙間部分のクッション  
としてご使用いただけます。

VT755 [JAN 4532965961363] 4,200円 (税込)

- サイズ/幅45×奥行22×高さ12cm
- 重量/約560g
- 材質/中材：モールド型低反発ウレタンフォーム  
カバー：ペロアタイプ (綿80%、ポリエステル20%)  
カラー：ネイビー



車いす使用時

## ヴィスコフロート アイ ランバーサポートクッション



腰のためのクッションです。  
車いすの背クッションとしてご使用いただけます。  
ベッドの上では腰を支えるクッションとしても  
ご使用いただけますが、高さが合わない  
腰痛の原因にもなりますので、ご注意ください。

VT757 [JAN 4532965961387] 4,200円 (税込)

- サイズ/幅31×奥行35×高さ10cm
- 重量/約550g
- 材質/中材：モールド型低反発ウレタンフォーム  
カバー：ペロアタイプ (綿80%、ポリエステル20%)  
カラー：ネイビー



車いす使用時

## ヴィスコフロート アイ ボディサポートピロー



体圧分散の抱き枕として、  
ベッドの上では様々な場面でご使用できます。  
いろいろな角度に折り曲げることができて、  
マルチに使えるボディサポートピローです。

VT759ネイビー [JAN 4532965961400] 5,250円 (税込)

VT760アイボリー [JAN 4532965961404] 5,250円 (税込)

- サイズ/長さ76×直径17cm
- 重量/約980g
- 材質/中材：モールド型低反発ウレタンフォーム  
カバー：ペロアタイプ (綿80%、ポリエステル20%)  
カラー：ネイビー・アイボリー



抱き枕など、  
様々な用途で  
ご使用いただけます。

中国製

## ヴィスコフロート アイ マルチクッション



丸めることで  
体位変換クッション  
として使用可能

中国製

車いすのシートクッション、  
背クッションとして、  
さらに丸めてベッドの上では足枕、  
体位変換クッションとして、あらゆる場面で  
ご使用できるマルチ型クッションです。

VT756 [JAN 4532965961370] 5,250円 (税込)

- サイズ/幅40×奥行40×高さ8cm
- 重量/約1000g
- 材質/中材：モールド型低反発ウレタンフォーム  
カバー：ペロアタイプ (綿80%、ポリエステル20%)  
カラー：ネイビー



車いす使用時

## ヴィスコフロート アイ シートクッション



ヘタリも少ない耐久性抜群のクッションです。  
体圧分散にも優れており、車いすだけでなく、  
すべての椅子に使えるシートクッションです。

VT758 [JAN 4532965961394] 4,200円 (税込)

- サイズ/幅40×奥行40×高さ4cm
- 重量/約580g
- 材質/中材：モールド型低反発ウレタンフォーム  
カバー：ペロアタイプ (綿80%、ポリエステル20%)  
カラー：ネイビー



車いす使用時

## ヴィスコフロート アイ 円座クッション



モールド型低反発のサークル型クッション。  
車いす用クッションとしてお使いになれます。  
穴が開いているので、傷口にもあたりません。

VT761 [JAN 4532965961417] 5,250円 (税込)

- サイズ/幅40×奥行40×高さ8cm
- 重量/約700g
- 材質/中材：モールド型低反発ウレタンフォーム  
カバー：ペロアタイプ (綿80%、ポリエステル20%)  
カラー：ネイビー



車いす使用時

中国製

カタログ掲載商品は、お試しのうえ、ご購入いただけます。

詳しくは、028-656-3636 までお問い合わせください。



<http://www.k-maruzen.com/>

## 株式会社マルゼン

〒321-0911 栃木県宇都宮市問屋町3413-51 TEL:028-656-3636 FAX:028-656-3637

- 製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
- 表示の価格は消費税(5%)を含んでいます。なお、消費税額は、消費税率の改訂にともない変更となります。
- 製品の寸法、重量の数値は、製造時の湿度や気温により多少の誤差が発生します。また表示を見やすくするため、一部の数値は「約」を省略しております。
- 商品、サービスに関するお問い合わせは、お求めの販売店か、(株)マルゼンまでご連絡ください。

### ウイスコフロートシリーズのメンテナンスについて

従来、低反発ウレタンフォームは、水洗いすると破損しやすく、洗浄は難しいとされてきましたが、近年、病院や介護施設向けのクリーニング機械の開発が進み、一部の専門リネン業者では水洗いメンテナンスが可能になりました。特殊なクリーニング機械なので、メンテナンスをしている専門業者は国内でもまだ数ヶ所しかありません。メンテナンスをご希望の際は代理店または(株)マルゼン028-656-3636までお問い合わせください。